

OPTICELL PATJOJEN HÄIRIÖTILANTEESSA TARKISTA ENSIN NÄMÄ 5 KOHTAA

JOS LAITE ILMOITTAÄ HÄIRIÖSTÄ, ENNEN KUIN POISTAT PATJAN KÄYTÖSTÄ KÄY LÄPI NÄMÄ 5 KOHTAA TAI OTA YHTEYTTÄ MEIHIN (P. 09 346 2574) NIIN KÄYDÄÄN NE YHDESSÄ LÄPI, KIITOS.

1

Tarkista että virtajohto ja CPR-liitin ovat kunnolla kiinni ohjaus-/pumppulaitteessa. Tarkista että CPR-venttiili on kiinni.



2

Tarkista ettei CPR-liittimen letku ja/tai muut johdot ja letkut ole pahasti taitoksissa. Johdot ja letkut ovat suojan sisällä.



3

Jos kennot tuntuvat tyhjiltä tai laite herjaa alhaista painetta, tarkista paineen ja sykliälin mukavuusasetukset. Voit testata kennojen täyttyvyyden myös laittamalla täyden paineen päälle (hoitotilapainike). Menee automaattisesti pois päältä 30 min päästä.



4

Jos yksi tai kaksi kennoa tuntuu tyhjiltä, tarkista että kennon liittimet ovat kiinni letkustossa. Liitin irtoaa helposti painamalla ja napsahtaa myös helposti takaisin paikalleen.



5

Sulje ohjaus-/pumppuyksikkö virtakatkaisimesta ja laita uudelleen päälle. Vaihda virtalähdettä ja testaa uudelleen.



JOS NÄMÄ EIVÄT AUTTANEET, TILAA HUOLTO

www.icf.fi, huolto@icf.fi tai 09 346 2574

KIITOS – ICF GROUP OY -