

SOFT EUROFLEX

Painehaavoja ennaltaehkäisevä hygieniapatja



Moottoroimaton
korkean riskin
painehaavapatja

Ainutlaatuinen
nestettä hylkivä
Lentex-pinnoite

Ei saumoja,
ei vetoketjuja

Hiostamaton
Active Membrane
-teknologian
avulla

SOFT EUROFLEX

Soft Euroflex on hygieniapatja, joka on kehitetty apuvälineeksi painehaavojen hoitoon korkean riskin potilaille asti. Patjan suunnittelun ansiosta koko patja keventää painetta ulkonevista kehonosista, kuten olkapäistä, kantapäistä ja kyynärpäistä. Soft Euroflex sisältää kolme eri vaahtomuoviydintä, jotka takaavat erinomaisen mukavuuden ja paineen tasaisen jakautumisen.

Hygieniapatja

Patja on testattu standardin SS EN ISO 811 mukaisesti. Patjassa on laminoitu Lentex®-pintakalvo. Siinä ei ole lainkaan saumoja eikä vetoketjuja, mikä parantaa hyvän hygienian edellytyksiä. Lisäksi valkoisen pintakalvon ansiosta henkilöstön on helpompi havaita patjan pinnalta epäpuhtaudet, jotka voidaan nopeasti puhdistaa kuivaamalla ja desinfioimalla. Pintakalvo on nestettä hylkivä ja tiivis. Active Membrane -teknologian ansiosta patja hengittää, mutta samalla nesteen läpituikutumisen riski on pienempi.

Hyväksytyt sänky- ja patjapesua varten

Automatisoidut sänky- ja patjapesut yleistyvät jatkuvasti. Siksi on tärkeää, että tuotteet kestävät tällaisen käsittelyn. Lentex-patjamme on testattu ja hyväksytty täysin ilman merkintöjä Sonosteam/Semi Staal -sänky- ja patjapesun käyttöä varten.

Kantapään paineen kevennys

Soft Euroflex -patjassa on dokumentoitu alhainen paine (45 mm/Hg) ulkonevien kehonosien, kuten kantapäiden kohdalla.


Painetta keventävät toiminnot

Vaahtomuoviydin koostuu kolmesta kerroksesta, joiden vaahtomuovityyppi on valittu tarkasti, jotta patja on erittäin mukava ja sen paineenkevennyskyky on hyvä.

Ainutlaatuinen Lentex®-pintakalvomme takaa hyvät hygieni ominaisuudet.

Swerea IVF on testannut Lentex® Soft Euroflex -patjan standardin SS 876 00 13 mukaisella mittausmenetelmällä. Testin mukaan patja on painetta keventävä haavaluokkaan 3 asti.

Testitulokset on esitetty alla.

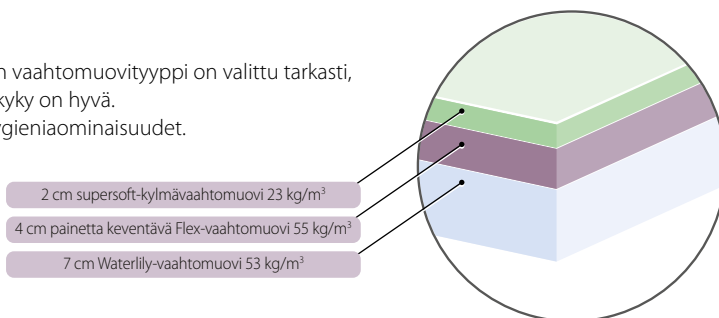

Patja	Iso painovartalo 300 N	Iso painovartalo 600 N	Pieni painovartalo 40 N
Soft Euroflex	26	48	45

TIETOJA PAINEMITTAUKSESTA

RISE on kehittänyt kehumuotteja, jotka simuloivat ihmisvartalon tiettyjen osien muotoa. Näin testi voidaan vakioida ilman eri ihmisten yksilöllisten erojen vaikutusta. Eri patjoja ja sänkyjä voidaan arvioida objektiivisesti painomattojen avulla ja lisäämällä niihin painovartaloihin keskipainoista ihmisen vartaloa vastaava kuormitus. Mittausmenetelmä on kuvattu ruotsalaisessa SS 876 00 13 -standardissa.

Uutta vastaavassa kunnossa olevien patjojen painetulojen luokitus

Kuormitus	Erittäin pieni	Pieni	Keskisuuri	Suuri
Iso kehumuotti 300 N	<30,0	30,0–34,9	35,0–39,9	40,0–44,9
Iso kehumuotti 600 N	<45,0	45,0–52,9	53,0–60,9	61,0–68,9
Pieni kehumuotti 40 N	<45,0	45,0–52,9	53,0–60,9	61,0–68,9

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

Materiaali 2 cm supersoft-kylmävaahtomuovia 23 kg/m³,
4 cm painetta keventävää Flex-vaahtomuovia
55 kg/m³ ja
7 cm Waterlily-vaahtomuovia 53 kg/m³.
Lentex®-pintakalvo on valmistettu polyuretaanista.

Koot 200/205/210 x 80/85/90/105/120 x 13 cm
(Muita kokoja voit tiedustella jakelijaltasi.)

Haavaluokka Korkeaan riskiin asti

Patjan paino 11–13 kg pituudesta ja leveydestä riippuen
(vakio koot)

Hygienia SS-EN ISO 811.

Käyttäjän paino 1–150 kg.

Takuu 3 vuotta patjan ytimen väsymisen
B-arvolle standardin SS 876 00 11 mukaisesti.
5 vuotta Lentexin kiinnitykselle.

Palostandardi SS 87600 01, normaali riski.
Testimenetelmä EN 597-1 & 2

Kierrätys Täysin kierrätettävä. Lajitellaan poltettavana
jätteensä. Purkamistoimia ei tarvita.

Merkintä Valmistusvuosi, -kuukausi ja -päivä, EAN,
huolto-ohjeet, yhteystiedot, standardit, joiden
vaatimukset tuote täyttää, ja asento sängyssä.



certified for use with Sonosteam/Semi Staal



Järven Health Care

Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN
Puhelin: +46 660 222 850 | Faksi: +46 660 824 10
www.jarven.se | healthcare@jarven.se

Jakelija: ICF Group Oy
Juhanilantie 4, 01740 Vantaa, Finland
www.icf.fi, myynti@icf.fi