

OptiCell 4 PRO pikakäyttöohje



Dynaamisesti painetta jakava ilmapatjajärjestelmä painehaavojen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn

Kytke virtajohto ja CPR-letku ohjausyksikköön. Kytke virtajohto virtalähteeseen. Kytke virta päälle. Patjan täyttymisessä kestää n. 20 minuuttia.

- A READY** Kun READY-merkkivalo syttyy, on patja käyttövalmis.
- B COMFORT** Voit säätää patjan kovuutta COMFORT-painikkeesta. Patjassa on 6 eri kovuusasetusta käyttäjän mieltymysten mukaan.
- C ALARM** Piippaavan hälytysäänen saa kuitattua pois tästä painikkeesta. Painikkeen vieressä on 2 eri kuviolla varustettua vikavaloa: Salama – joka ilmaisee sähkövikaa ohjausyksikössä ja Tuuli – joka ilmaisee vuotoa kennoissa tai letkustossa.
- D CYCLE TIME** Käytä tätä painiketta muuttaaksesi sykliä patjan ollessa vaihtuvapaineisessa tilassa. Sykliä voi asettaa 10, 15, 20 tai 30 min.
- E CARE/STATIC** Tästä painikkeesta voit asentaa maksimikovuuden (hoitotilan) valitsemalla CARE tai minimipaineisen staattisen tilan valitsemalla STATIC.
- F DYNAMIC** Paina tätä painiketta asettaaksesi patjan vaihtuvapaineiseen tilaan. Suosittelemme vaihtuvapaineista tilaa ensisijaisesti käytettäväksi.

